

ARR-R12

取扱説明書



接続までの簡単な流れ。

STEP1

まずはスマートフォンに
アプリをダウンロード。

P-08



STEP2

ダウンロードしたアプリ
を立ち上げます。

P-09



STEP3

[すぐにバインドします]
をタップする。

P-11

まだデバイスを接続して
いません！

すぐにバインドします

STEP4

COLMI R12_9706

31.38.45.33.07.06

1.00.00

接続済み

バッテリー: 110%

接続を解除する



表示がでたら接続完了です

弊社商品をお買い上げいただきありがとうございます。
本商品をご利用頂くにあたり、本製品以外に下記をご用意
ください。

- ・スマートフォン iOS10 ～ / Android 8 ～
(※アプリをダウンロードする必要があります。)
- ・USB 充電器
(※USB からの給電可能な代替環境があればそちらで問題
ありません。パソコンのUSB ポート等。)

商品が届きましたら、初めに1時間充電をおこなってくだ
さい。

※注意

スマホと本製品の接続はアプリから行います。
決してスマートフォンの Bluetooth 設定から接続しないで
ください。
先に登録してしまった場合は Bluetooth 設定からペアリン
グを外し、登録機器からの削除をお願い致します。

別売充電器のご案内

Mini
AC CUBE



[メーカー] エアリア (AREA)
[商品名] Mini AC CUBE 1A
[JANCODE] 4560490566937
[商品型番] MS-USB1A

パソコンのUSBやスマホ用充電器で充電出来ますので、お持
ちでない場合ご検討ください。

注意事項

- 本製品は精密機械であるため、落下やぶつけるなどの衝撃を与えないでください。性能や機能の異常、または外装の破損の原因になります。
- ご利用の前に、付属の USB 充電スタンドにて 1 時間充電してからご利用ください。(P-06 参照)
- 化粧品、日焼け止めクリーム、アルコール、化学洗剤、防虫剤など刺激の強い薬品は本製品の金属部分やプラスチック部分を傷める恐れがありますので使用しないでください。付着した場合は、キレイな布でお拭き取りください。
- 車のダッシュボードなどの振動がある場所、高温になる場所での保管はおやめください。本製品の故障、破損の原因になります。
- 急激な気温の変化にさらさないでください。
- 本製品を充電する前に、リングに汚れがある場合は、必ず汚れを拭き取ってから、充電してください。故障の原因になります。
- 肌に違和感や異常を感じた場合、直ちにご使用をおやめください。
- 本製品を分解しないでください。
- 航空機内では使用しないでください。電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。ワイヤレス機能の航空機内でのご利用については、ご利用の航空会社に使用条件などをご確認ください。
- 本製品で測定できる数値はあくまで目安となる参考値であり、医療目的で使用できるデータではございません。測定する環境、装着の具合によって数値に大きな差異が出ることがございます。不具合ではございません。
- ペースメーカーや除細動器などの医療機器を装着されている場合、本品の電波が機器の動作に影響を与える可能性があります。医師や医療用機器製造者に影響を確認してからご使用ください。

■全ての機能は日常的な運動管理であるウェルネス・フィットネス目的の製品であり医療機器ではありません。病気などの診断、予防、治療の目的にはご使用いただけません。

■保管の際は小さなお子様の手が届かぬ場所で保管してください。

■本商品は株式会社エアリアと COLMI 社の共同企画にて製造販売を行っている商品です。

■本製品は精密機器です。ご利用に際しては本製品の取扱説明書をご熟読頂き正しくご利用ください。

■商品は予告なしに一部を改良する場合がございます。

■iPhone は米国 Apple Inc 社における米国及びその他の国における登録・登録商標です。Android は Google LLC の商標です。

バッテリーに関しまして

(ご利用に関しては事前にご確認頂き、ご利用ください。)

- ・本製品はリチウムイオン充電電池を含みます。
 - ・本製品に強い衝撃を与えないでください。
 - ・シャワーやサウナの粒子が細かな水分が発生する場所ではご利用頂けません。本製品の故障や、リチウム電池の膨張 / 発熱等の原因につながります。
 - ・充電を行う場合は付属の充電ケーブルを用いて充電を行ってください。
 - ・急速充電器や PD 充電器は使用しないでください。
- 通常 (5V/1A 程度) の USB 充電器をご利用頂くか、パソコンの USB ポートでの充電をおこなってください。
- ケーブルを束ねた状態で充電をおこなわないでください。

バッテリーの経年劣化は保証対象外になります。
廃棄する場合はお住まいの自治体のルールに基づき廃棄してください。

・装着時に本製品が熱をもつ (いつもとは異なる) 等の異常を感じた場合はご利用を止めてください。

クリーニング

- 汚れた場合は柔らかい布を濡らし、固く絞ってから拭き取ってください。
- 乾いた柔らかい布でキレイに完全に乾くまで拭きとってください。
- 接点に汚れが溜まると正常に充電出来ないうえに、故障、発火の原因となります。

測定に関しまして



本製品はセンサーを搭載しています。

測定時は、センサーが皮膚に安定して接触するように本機を装着してください。センサーの接触が不安定な場合、正確に測定できないことがあります。

温度が低い場所では血流が減る為、正確に測定出来ないことがあります。



同梱品

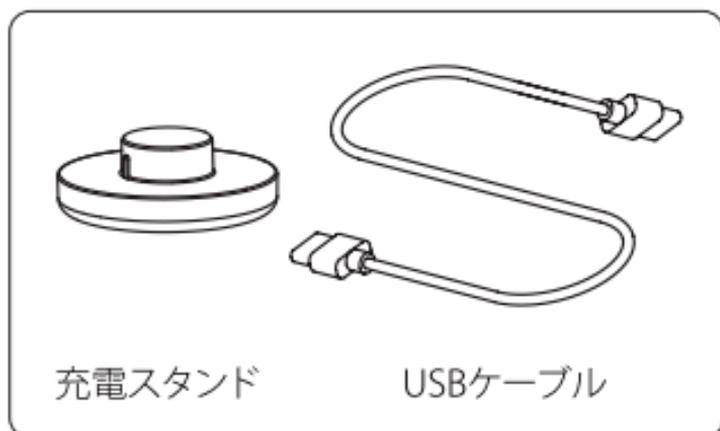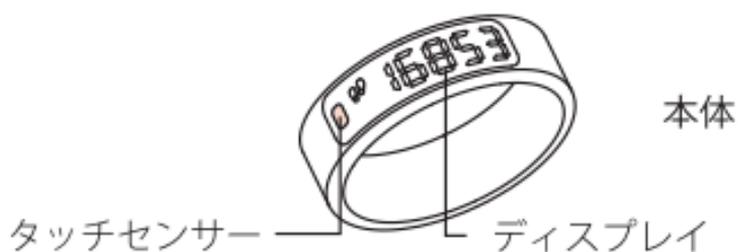

本体、充電スタンド、USBケーブル、
説明書兼保証書(本書)



仕様

通信	Bluetooth ver 5.0
最大通信距離	最大 10m (障害物なきこと)
連続待機時間	3日
充電時間	約1時間



充電

充電スタンドに付属のUSBケーブルを接続してください。
次に USB 充電器等の給電機器に接続してください。

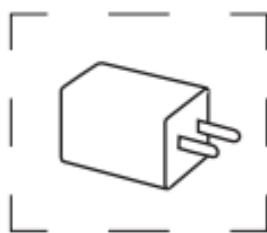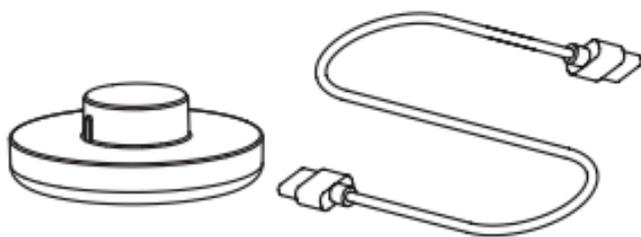

お持ちの物をご利用頂くか
別途ご用意ください。


充電スタンドにスマートリングを置いてください。
この時、スタンドの凸とスマートリングの凹が一致しないと充電ははじまりません。

※リングの内周をなぞって頂くと溝をご確認いただきやすいです。



リング

充電器

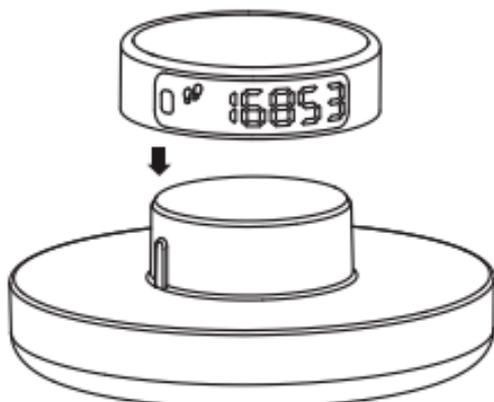


充電中・・・赤 LED 点灯

満充電・・・緑 LED 点灯

指への装着

リングは自分の指にあった、快適なサイズを装着してください。

データの測定精度を高めるために、人差し指・中指・薬指での着用をおすすめします。

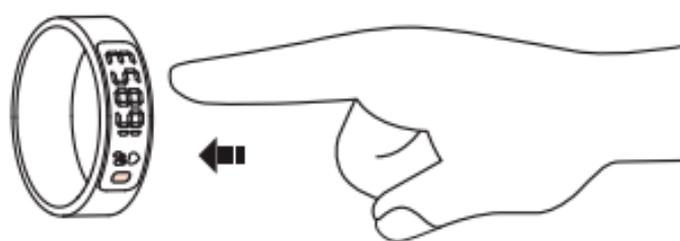

「装着時は、心拍数と血中酸素濃度をより正確に測定するために、測定センサーが指の内側に接するようにしてください。」

※皮膚に異常を感じた場合は、ご利用をやめ病院を受診してください。



アプリ iPhone / Android用



iPhone をご利用の場合は AppStore



APP Store: QRing



Android をご利用の場合は Play Store



Google Play: QRing




より「QRing」を検索頂く事でダウンロード頂けます。

※QRing は無料アプリです。


有料プランの表示などが出た場合は間違ったアプリを検索されている可能性がありますのでお確かめください。

※アプリ内容はバージョンアップ等により
変わる事がございます。

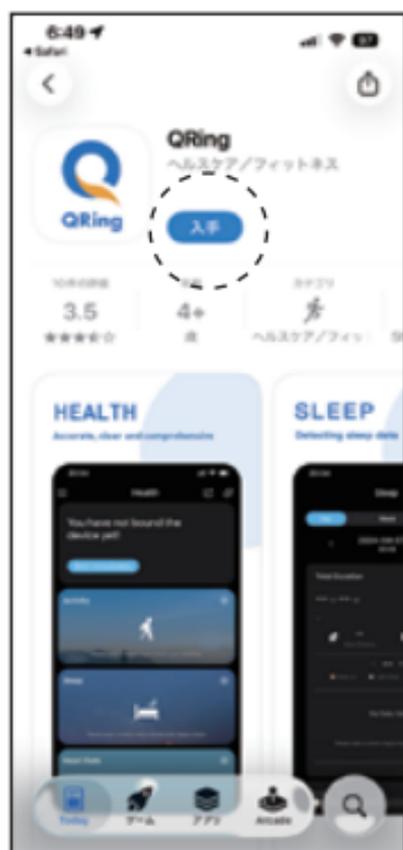

「入手」をタップしてください。

iPhoneの場合は右のように「サイドボタンで承認」と
なりますのでサイドボタンをダブルクリックしてください。

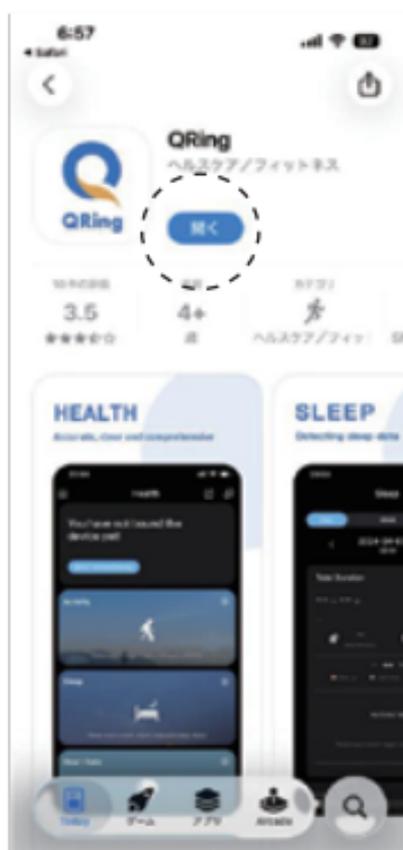

ダウンロードが終わりますと「
入手」が「開く」に変わります。

※ダウンロードにかかる時間
の通信環境により異なります。

「開く」をタップして、アプリを起
動してください。





①「位置情報の使用を許可しますか」は〈アプリの使用中は許可〉をタップしてください。

②「通知を送信します。よろしいですか？」は〈許可〉をタップしてください。



③「Bluetooth デバイスを探すことを許可しますか？」は〈許可〉をタップしてください。

④右下の画面になりましたら一番下の〈スキップ〉をタップしてください。

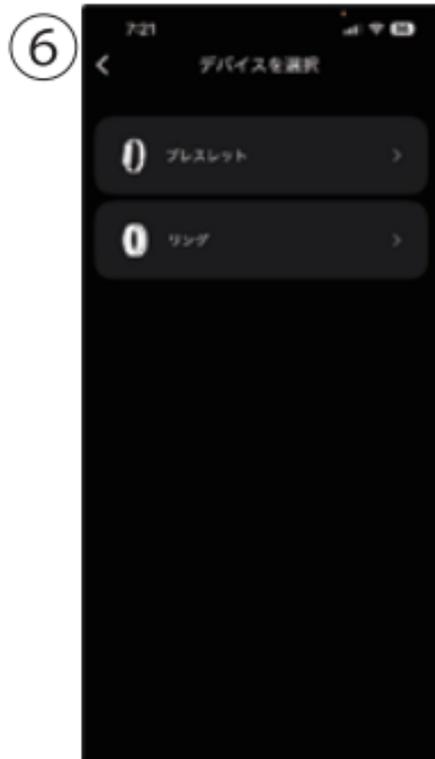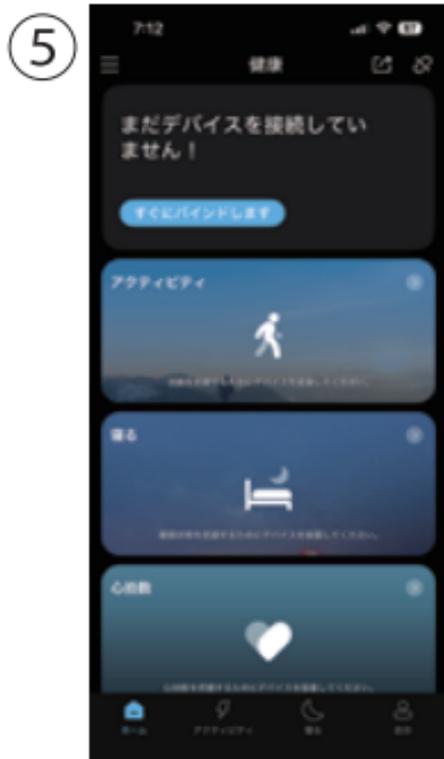

⑤画面上部にある「すぐにバインドします」をタップしてください。

⑥〈リング〉をタップしてください。



⑦自動的に周辺にあるリングを検索します。

みつかりましたら COLMI R12 と表示がでますのでタップしてください。

⑧画面が変わり Bluetooth ペアリングの要求の表示がでますので「ペアリング」をタップしてください。

以上でペアリング操作は完了です。



ディスプレイ表示


スマートリングのディスプレイにはタッチセンサーに触れる毎に4つの画面に切替わります。



歩数 → 心拍数 → バッテリー残量 → 時間の順になります。

心拍数の測定を行う場合はタッチセンサーに指を置いたままにしてください。

画面の表示が点滅し測定を開始します。

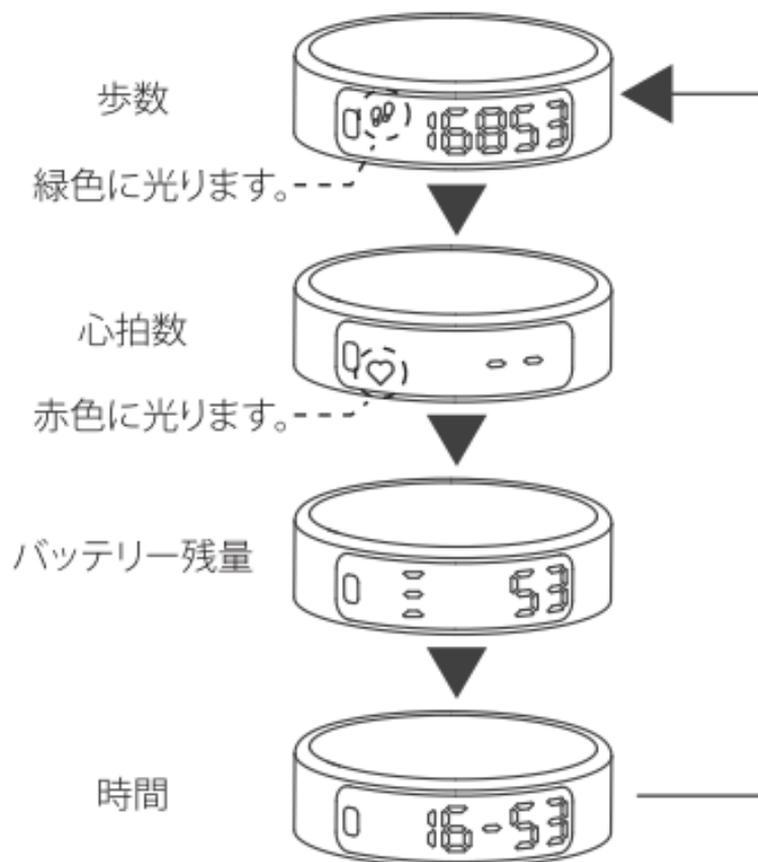

ディスプレイが消えている時にタッチセンサーをタップすると表示させる事が可能です。

■ ペアリング出来ない場合

1. スマートフォンの Bluetooth はオンになっていますか。
2. アプリはダウンロードしましたか。
3. アプリからペアリングを行いましたか。
4. リングのタッチセンサーをタップすると画面表示はでますでしょうか (P12 参照)
5. 間違ってスマホの Bluetooth から接続した場合は登録が残っていないかご確認ください。
登録が残っている場合は、登録を削除してください。

iPhone の場合

設定→Bluetooth 内より下記「自分のデバイス」をさがしてください。右端の青い i のマークをタップ。
「このデバイスの登録を解除」をタップしてください。
確認画面が出ましたら、「デバイスの登録を解除」をタップください。



■ FAQ

・時計があわない、表示がされない。

ペアリングがされていないと時計があいませぬ。

一度もペアリングをしていない場合。

→アプリをスマートフォンにダウンロードしてください。(P-08 参照)

→アプリのダウンロードは完了している。

アプリを起動してください。(P-10 参照)

既にペアリングは行っている。

→一度アプリを起動して同期をおこなってください。

※アプリは基本的にバックグラウンドで起動しておいてください。



アプリ内表示


アクティビティ

歩数、距離、消費カロリーの表示



睡眠

指輪を装着して眠ると睡眠の質を測ります。

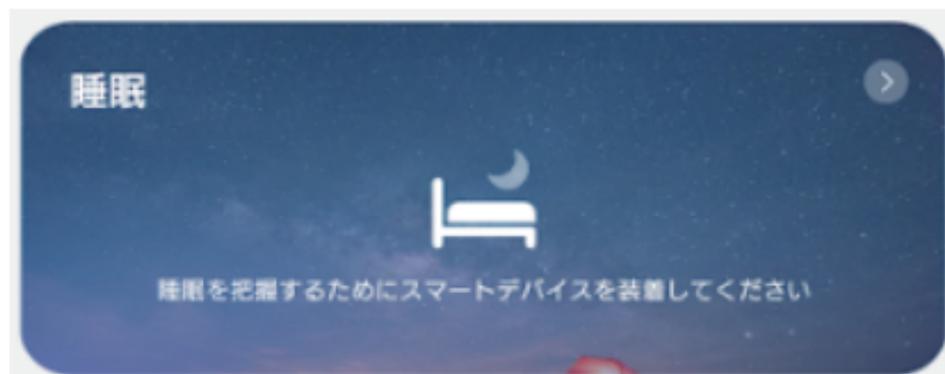


22時～8時の間に計測を始めます。
一度目覚めると再計測は翌日までしません。



アプリ内表示

心拍数

指輪からも計測可能ですが、アプリ側からも計測する事が可能です。

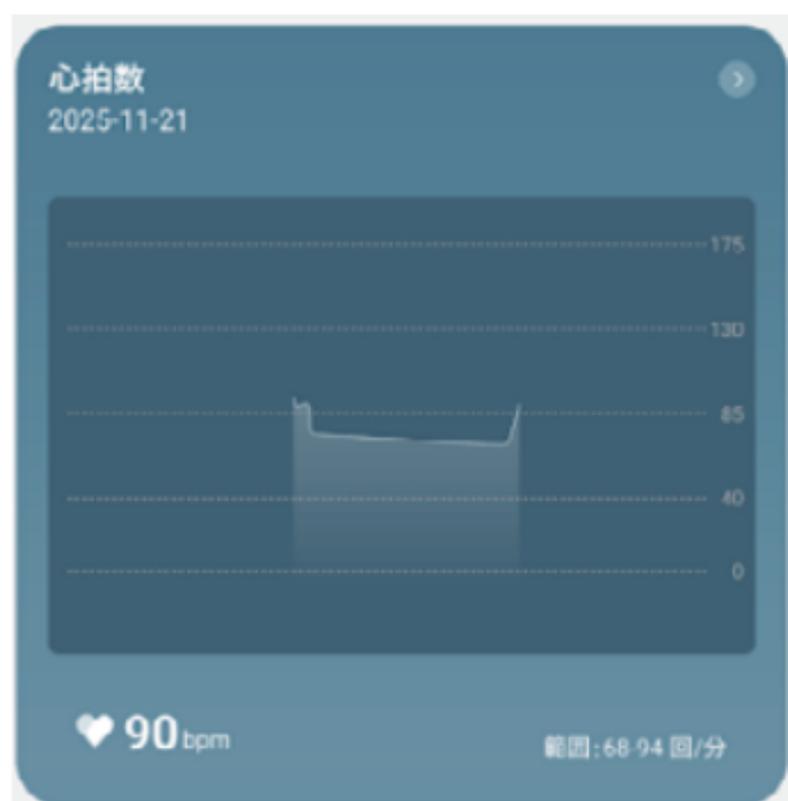

運動記録

100を越える種目からお選び頂くことが可能です。






アプリ内表示


心拍数の変動

Heart Rate Variability (HRV)は連続する心拍間の時間(RR間隔)になります。

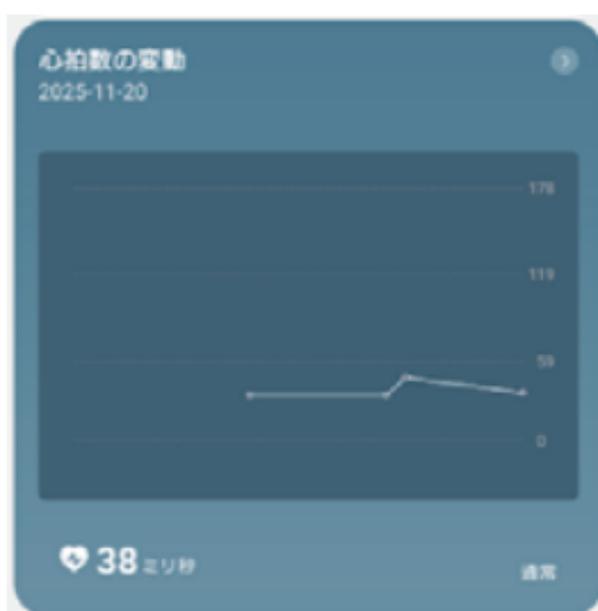

- 低い <30
- 通常 30-60
- 良い 61-101
- 素晴らしい >101

血中酸素ウェルネス

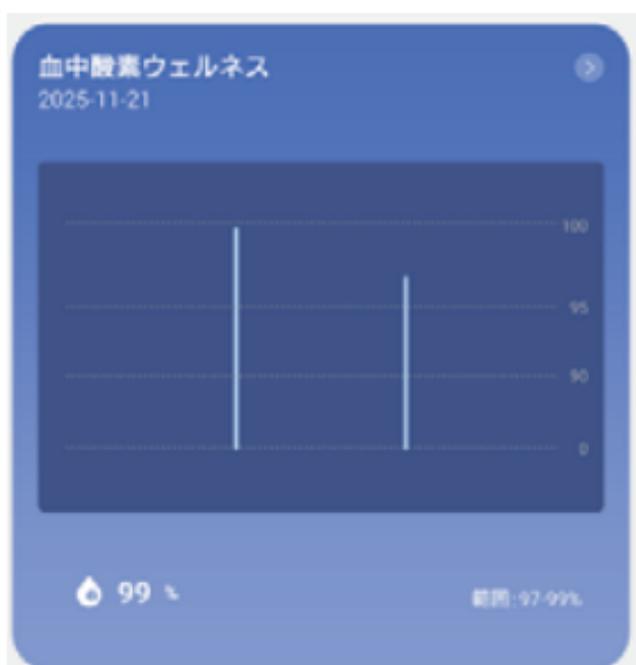

- <95%
- 95~97%
- >=98%



アプリ内表示

ストレス
ストレスの測定を行います。



- リラックス 0-29
- 正常 30-59
- 中 60-79
- 高い 80-100

■ 装着する手による表示の変更方法。

リングの表示は右手装着を基本としていますが、左手に装着する場合に上下を反転させる事が可能です。



アプリの画面下に並ぶ4つのアイコンから人の絵のアイコンをタップして選択します。

アイコンをタップして切替わった画面の中よりディスプレイ設定をタップしてください。



ディスプレイ設定をON  にして頂くと表示が増えます。

この中にある「装着習慣」の横に「右手」と記載がありますのでタップしてください。

下の画像のような表示がでますので、右手の表示をタップしたまま下に画面をなぞってください。



左手になりましたら右上の保存をタップしてください。以上でリングの表示が上下反転致します。

※設定は電源が切れた時やペアリングが外れると元に戻りますので、その時は再設定をお願いします。

■ リングのリセット、シャットダウン方法



アプリの画面下に並ぶ4つのアイコンから人の絵のアイコンをタップして選択します。

アイコンをタップして切替わった画面の中よりシステム設定をタップしてください。

 システム設定



システム設定

デバイスのシャットダウン



リセット



・デバイスのシャットダウン
・リセット
を行う事が可能です。

必要に応じて行ってください。

※ご注意ください。

シャットダウンは充電中には行えません。
また、シャットダウン後に電源を入れる為に
一度充電台で充電して頂く必要があります。

リセットを行いますとリング内に保存されている
歩数、カロリー、距離、睡眠データが削除されます。

株式会社エアリア サポート

下記フォームよりお問い合わせください。

<https://www.area-powers.jp/support/infosupport.html>



株式会社エアリア [TEL] 03-5779-6011 営業時間：平日 10-17 時
土日祝祭日・夏季・年末年始休業期間を除く

無償保証適応外に関しまして

1. 本体の物理的損傷、改造の痕跡がみられる場合。
2. 保証書に購入店印、購入日が記載されていない、または購入日がわかるレシート等がご提示頂けない場合。
3. 中古品やオークション等で入手された製品の場合。
4. 火災、落雷、水害等天変地異や異常電圧による故障原因。
5. 高温多湿の場所での使用や、埃、ゴミの混入による故障が原因の場合。

保証書

商品名	スマートリング R12
商品型番	ARR-R12 シリーズ
保証期間	6 カ月間

購入店印

購入日

※ケーブル断線等、水濡れ、落下、物理的破損を除く本製品仕様による直接、間接的な損害に関しましては一切の責任を負いかねます。

販売小売店のレシートでも代用可能ですが、その場合は本製品の型番と購入日が表記されている必要がございます。感熱紙の場合、保証期間内に印字が消える可能性がございますのでコピー等を行い本書と一緒に保管をお願い致します。

※本書の再発行は致しません。